

| ВЕЛТОЛЕН | |
|---|---|
| ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ | |
| Протирание поверхностей (бактерии, исключая туберкулез) | 0,125 % - 60 минут |
| | 0,25 % - 30 минут |
| | 0,5 % - 15 минут |
| | 1 % - 5 минут |
| Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1 % - 30 минут |
| Протирание поверхностей (туберкулез) | 0,5 % - 120 минут |
| | 1 % - 60 минут |
| | 2 % - 30 минут |
| | 4 % - 15 минут |
| Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1,25 % - 60 минут |
| Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1,25 % - 60 минут |
| Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1,25 % - 60 минут |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | 1,25 % - 60 минут |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | ИМН из металлов, пластмасс, стекла: |
| | 1 % - 60 минут |
| | ИМН из резин: |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 1,25 % - 30 минут |
| | ИМН из металлов, пластмасс, стекла: |
| | 1 % - 60 минут |
| ПСО | ИМН из резин: |
| | 1,25 % - 30 минут |
| | ИМН без полостей, каналов, замков: |
| | 0,25 % - 30 минут |
| ДВУ | 0,5 % - 15 минут |
| | ИМН прочие: |
| | 0,5 % - 30 минут |
| | 2 % - 30 минут (при 50С); |
| | 2,5 % - 15 минут (при 50С) |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ | |
| Дезинфекция кузезов | 1 % - 30 минут |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | 0,25 % - 90 минут |
| | 0,5 % - 60 минут |
| | 1 % - 30 минут |
| | 2 % - 15 минут |
| Дезинфекция воздуха | 2 % - 60 минут (Дезинфекцию воздуха проводят с помощью аэрозольного генератора. Норма расхода раствора 50мл/м3) |
| Дезинфекция мочи | 1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении моча:раствор 1:1) |
| Дезинфекция крови | 1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении кровь:раствор 1:1) |
| Дезинфекция мокроты | 1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении мокрота:раствор 1:1) |
| Дезинфекция фекалий | 1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении фекалии:раствор 1:1) |