

ВЕЛТОЛЕН-ЭКСТРА	
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ	
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	0,25%-90мин;
	0,5%-60мин;
	1%-15мин
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	2%-30мин;
	2,5%-15мин
Протирание поверхностей (туберкулез)	2,5%-60мин
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	2,5%-60мин
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25%-60мин
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	2,5%-30мин
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	2,5%-60мин
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	2,5%-60мин
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	ИМН из металлов,пластмасс, стекла:
	2%-30мин;
	ИМН из резин:
ПСО	2,5%-30мин
	ИМН без полостей,каналов,замков:
	0,25%-30мин;
	0,5%-15мин;
	ИМН прочие:
	0,5%-30мин
Стерилизация	-
ДВУ	-
Дезинфекция кожных покровов	-
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 100мл/м ² ; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 100мл/м ² ; 3 - расход раствора 4л/кг сухого белья; 4 - расход раствора 2л/комплект столовой посуды	
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ	
Дезинфекция кувезов	2%-30мин;
	2,5%-15мин
Дезинфекция поверхностей против плесени	2,5%-60мин
Дезинфекция воздуха	-
Дезинфекция диализной аппаратуры	-
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц	-
Дезинфекция мочи	2,5%-60мин (заливание раствором в соотношении моча:раствор 1:1)
Дезинфекция крови	2,5%-60мин (заливание раствором в соотношении кровь:раствор 1:1)
Дезинфекция мокроты	2,5%-60мин (заливание раствором в соотношении мокрота:раствор 1:1)
Дезинфекция фекально-мочевой смеси	-
Дезинфекция фекалий	2,5%-60мин (заливание раствором в соотношении фекалии:раствор 1:1)
Дезинфекция рвотных масс	-