

# ОРЭНДЖ СОЛВЕНТ

*специальный очиститель для  
стоматологических инструментов*

- на основе натурального апельсинового масла
- прекрасные чистящие свойства
- с легкостью очищает остатки стоматологических материалов



## НАЗНАЧЕНИЕ

Готовое к использованию средство для деликатной и эффективной очистки стоматологических инструментов и оборудования. Отлично удаляет остатки гипса, пасты и цемента. Также эффективно против устойчивых пятен и разводов, таких как масляные пятна, пятна смолы на одежде и ковровых покрытиях.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- очистка ИМН из разных материалов, включая стоматологические инструменты, ручным способом;
- удаление остатков альгинаты и цемента, а также пятен цинка-эвгенола;
- очистка от стоматологических паст перевязки и заготовок из гипса;
- удаление остатков йода и прочих цветных пятен;
- удаление нежелательных наклеек и старых меток, а также остатков клея;
- удаление остатков жирных пятен с одежды, ковровых покрытий и обивки мебели;
- удаление нежелательных полос с полов из линолеума и ПВХ;
- удаление следов от жирных карандашей и маркеров.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите небольшое количество средства на кусок ткани или ватный тампон и протрите обрабатываемую поверхность.

**Внимание:** не гарантируется совместимость средства со всеми видами синтетических материалов – особенно не рекомендуется использовать на акриловом стекле и поликарбонате. Перед использованием рекомендуется проверять совместимость с поверхностью путем обработки небольшой области непримечательной части поверхности.

## СОСТАВ

В качестве основного компонента содержит натуральное апельсиновое масло, а также децилолеат.

## ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы 250 мл.  
Флаконы 500 мл.

# ОРЭНДЖ СОЛВЕНТ

*специальный очиститель для  
стоматологических инструментов*

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Вещество горючее. Может вызывать раздражение кожи. Не глотать. Беречь от детей. Не допускать попадания неразбавленного средства в водостоки. При работе со средством рекомендуется использовать специальные защитные перчатки, очки с боковыми щитками, рабочую одежду с длинными рукавами.

## **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**Общие указания.** Незамедлительно снять загрязненную, пропитанную веществом одежду. При плохом самочувствии обратиться к врачу.

**После вдыхания.** При несчастном случае после вдыхания паров, человека следует вывести на свежий воздух. При наличии жалоб обратиться к врачу.

**После контакта с кожей.** Тщательно промыть водой с мылом. Если раздражение долго не проходит, обратиться к врачу.

**После попадания в глаза.** Сразу промывать (под веками тоже) большим количеством воды в течение 15 минут. Если раздражение долго не проходит, обратиться к врачу-специалисту.

**После проглатывания.** Прополоскать рот, запить большим количеством воды. Обратиться к врачу.

## **МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не допускать попадания в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Разрешается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих жидкостей, действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Хранить в плотно закрытой оригинальной таре производителя, в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +10°C до +27°C, вдали от источников тепла, открытого огня, окислителей, пищевых продуктов, напитков и кормов.