



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ВЕЛТОГРАН»

АННОТАЦИЯ

«ВЕЛТОГРАН»

**высокоэффективное, универсальное и безопасное
дезинфицирующее и стерилизующее средство
в виде гранул, растворимых в воде**

*Не содержит хлор, пероксиды и альдегиды.
Можно применять в присутствии людей.
Легкость и точность дозировки.*

ПРИМЕНЯЕТСЯ

- для дезинфекции поверхностей и материалов;
- для предстерилизационной очистки;
- для дезинфекции высокого уровня;
- для стерилизации изделий медицинского назначения;
- для дезинфекции воздуха методом орошения, распыления и аэрации.

СОСТАВ

Основным действующим веществом является уникальная отечественная дезинфекционная субстанция «ВЕЛ-ТОН» (клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом).

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

➤ Бактерий (грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая возбудителей туберкулеза, анаэробов,





АННОТАЦИЯ

внутрибольничных инфекций, возбудителей особо опасных инфекций – чума, холера, легионеллез, туляремия, сибирская язва).

➤ Вирусов, в т. ч. в отношении возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции.

➤ Патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов.

➤ Спор.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Относится к 4 классу малоопасных веществ.

Не обладает: сенсibiliзирующими и кумулятивными свойствами, а также отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

СВОЙСТВА

➤ Сочетает дезинфицирующие, стерилизующие, моющие, дезодорирующие и антикоррозионные свойства.

➤ Не фиксирует органические загрязнения.

➤ Не портит любые обрабатываемые поверхности (натуральные и искусственные ткани, пластмассы, стекло, дерево, металл, резину и др.).

➤ Характеризуется остаточным антимикробным действием.



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ВЕЛТОГРАН»

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

➤ Здравоохранение

для дезинфекции:

- поверхностей в помещениях, включая мягкие (ковровые, и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкую мебель);
- на объектах транспорта;
- белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.);
- обуви из различных материалов;
- промывных вод;
- остатков пищи инфекционных отделений стационаров;
- столовой посуды, аптечной и лабораторной посуды;
- санитарно-технического оборудования, уборочного материала, резиновых коврик;
- медицинских отходов класса Б, в том числе изделий одноразового применения перед их утилизацией;
- выделений больного и биологических жидкостей;
- воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов, в т. ч. хирургических и стоматологических инструментов.

для предстерилизационной очистки:

- совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, ручным способом;
- совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, механизированным способом с использованием ультразвука



АННОТАЦИЯ

в установках: «Ультразвук»; УЗО-5-01-«МЕДЭЛ»; УЗО-10-01-«МЕДЭЛ»;

- предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки ручным и механизированным способами жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов;

для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним;

для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, включая родильные дома и неонатологические отделения, детских, пениitenciарных учреждениях, в учреждениях социального обеспечения;

для дезинфекции воздуха и поверхностей способом распыления, орошения и аэрации:

- при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции: в инфекционных очагах и в лечебно-профилактических учреждениях, в т. ч. акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических и пр.;
- при проведении генеральных уборок.

➤ Предприятия пищевой промышленности и общественного питания

мясная, молочная и птицеперерабатывающая промышленности, кафе, рестораны, столовые и т. д.





ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ВЕЛТОГРАН»

➤ **Коммунально-бытовая сфера**

парикмахерские, гостиницы, бассейны, сауны, спортивные комплексы, фитнес-центры, супермаркеты и т. д.

➤ **Учреждения системы образования**

дошкольные и школьные учреждения, загородные учреждения отдыха, детские дома и пр.

➤ **Объекты транспорта**

авто, авиа, железнодорожный, водный, в том числе для перевозки пищевых продуктов.

➤ **Для использования населением в быту.**

ФОРМА ВЫПУСКА

гранулы в полимерных ёмкостях 50 г, 1 кг.

СРОК ГОДНОСТИ

средства – 5 лет,
рабочих растворов – 14 суток.





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.99.01.002.E.038627.09.11

от 21.09.2011 г.

Продукция:
средство дезинфицирующее "ВЕЛТОГРАН". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-005-71954720-2007 "Средство дезинфицирующее "ВЕЛТОГРАН". Изготовитель (производитель): ООО "НПО "ВЕЛТ", 119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, корп. 7 (адрес производства: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д. 9), Российская Федерация. Получатель: ООО "НПО "ВЕЛТ", 119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, корп. 7, Российская Федерация.



(наименование продукции, перечисляемые в (или) исключительные права на товарный знак, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)


прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
в соответствии с инструкциями по применению средства: от 09.10.2007г. № 005-10/07-И, от 09.10.2007г. № 005-11/07-ИК.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертного заключения от 16.10.2007г. № 172-уч. ФГУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора; ТУ 9392-005-71954720-2007; рецептуры; этикетки; инструкций по применению средства: от 09.10.2007г. № 005-10/07-И, от 09.10.2007г. № 005-11/07-ИК

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза


Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

№ 0150436

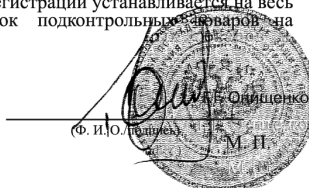



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии»
Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»**

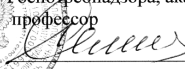СОГЛАСОВАНО
Руководитель ИЛЦ, директор ФГУН
«ЦНИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, академик РАМН,
профессор
 Покровский В.И.
«18» октября 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПО «ВЕЛТ», к.м.н.
 Иванова Е.Б.
«18» окт. 2007 г.
№ 005-10/07-И



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
дезинфицирующего средства «ВЕЛТОГРАН»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)**

**для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки
и стерилизации в лечебно-профилактических, детских,
пенитенциарных учреждениях, на объектах
санитарного транспорта, в учреждениях
социального обеспечения**



Москва, 2007





УДК 614.484 (083.131)

ББК 51.9я82

И72

Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТО-ГРАН» (ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия) для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации в лечебно-профилактических, детских, пенитенциарных учреждениях, на объектах санитарного транспорта, в учреждениях социального обеспечения. М.: ООО «Издательский Дом «ВЕЛТ», 2012 г. – 60 с.

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в т. ч. акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи и т. д.), соответствующих подразделений МЧС, а также детских, пенитенциарных учреждений, объектов социального обеспечения, работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

ISBN 978-5-91647-030-7

© ООО «НПО «ВЕЛТ», 2012 г.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И
по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТОГРАН»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)
для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки
и стерилизации в лечебно-профилактических, детских,
пенитенциарных учреждениях, на объектах
санитарного транспорта, в учреждениях
социального обеспечения

Инструкция разработана:

- ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва);
- Научно-производственным объединением «ВЕЛТ» (НПО «ВЕЛТ», г. Москва);
- Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУЗ ФЦ Гигиены и эпидемиологии ФС Роспотребнадзора, г. Москва);
- ФГУ РНИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Росздрава (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена Росздрава, г. Санкт-Петербург).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ВЕЛТОГРАН» представляет собой мелкие гранулы белого цвета, растворимые в воде. В качестве действующего вещества гранулы содержат клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом, а также функциональные и технологические компоненты.

1.2. Срок годности средства «ВЕЛТОГРАН» составляет 5 лет, рабочих растворов – 14 суток. Хранить средство



ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

следует в закрытой упаковке производителя в местах, защищенных от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 °С до +40 °С, отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям. Средство удовлетворительно растворимо в воде. Растворы средства могут быть опалесцирующими или мутными в зависимости от рабочей концентрации раствора.

1.3. Средство «ВЕЛТОГРАН» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 «ВЕЛТОГРАН» не является опасным грузом.

1.4. Выпускается средство в полимерных флаконах, банках или коробках, или пакетах, весом нетто 1000 г; в картонных пачках по 10 пакетов (в пакете 2,5 г гранул) или в другой приемлемой для потребителя таре по действующей нормативной документации, обеспечивающей сохранность средства в течение всего срока годности.

1.5. Растворы средства обладают *антимикробной активностью*, в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, легионеллеза, внутрибольничных, анаэробных и особо опасных инфекций – чума, холера, сибирская язва, туляремия); вирусов (включая возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции); патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, а также спороцидной активностью.

1.6. Растворы средства обладают моющими, дезодорирующими, антикоррозионными свойствами, не портят обраба-



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

тываемые объекты и не обесцвечивают ткани, не обладают фиксирующим действием. Средство обладает остаточным антимикробным действием.

Средство нельзя смешивать с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.7. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу – при нанесении на кожу, к малотоксичным веществам при парентеральном введении; к 4 классу малоопасных веществ при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях по степени летучести. Средство «ВЕЛТОГРАН» не обладает сенсibiliзирующими и кумулятивными свойствами, а также отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадотропным).

1.8. Средство «ВЕЛТОГРАН» предназначено для применения:

➤ при проведении профилактической и очаговой дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, в т. ч. акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических и пр., а также в детских, пенитенциарных учреждениях и социального обеспечения, на объектах санитарного транспорта;

➤ при инфекциях бактериальной (включая внутрибольничные, анаэробные инфекции, туберкулез, легионеллез, особо опасные инфекции – чума, холера, сибирская язва, бруцеллез, туляремия), вирусной (включая острые респираторные вирусные инфекции, парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию), и грибковой этиологии (включая дерматофитии, кандидозы, а также деконтаминацию объектов в отношении плесневых грибов), в т. ч.:



ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

для дезинфекции:

- поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), включая мягкие (ковровые, и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкую мебель);
- на объектах автотранспорта;
- поверхностей медицинских и специальных аппаратов, приборов, оборудования, включая куветы для недоношенных детей;
- предметов ухода за больными из различных материалов, игрушек;
- белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.);
- обуви из различных материалов;
- столовой посуды, аптечной и лабораторной посуды;
- санитарно-технического оборудования;
- уборочного материала, резиновых коврик;
- медицинских отходов, в т. ч. изделий одноразового применения, перед их утилизацией;
- выделений больного и биологических жидкостей;
- воздуха;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов, в т. ч. хирургических и стоматологических инструментов (включая ротационные и замковые;
- слюноотсосов, стоматологических оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металла, керамики, пластмассы, артикуляторов);

для предстерилизационной очистки:

- совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, ручным способом изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты;





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией механизированным способом с использованием ультразвука в установке «Ультразэт»; УЗО-5-01-«МЕДЭЛ»; УЗО-10-01-«МЕДЭЛ» изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты;
- предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки ручным и механизированным способами жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов;

для стерилизации изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, в лечебно-профилактических учреждениях;

для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, включая родильные дома и неонатологические отделения, детских учреждениях и социального обеспечения.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, стеклянные, эмалированные) путем растворения определенного веса гранул в воде в соответствии с табл. 1.



ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «ВЕЛТОГРАН»*

Концентрация раствора по препарату, (%)	Количества средства и воды, необходимые для приготовления:			
	1 л рабочего раствора		10 л рабочего раствора	
	Количество средства (г)	Вода, мл	Количество средства (г)	Вода, мл
1	2	3	4	5
0,02	0,2	999,8	2,0	9998,0
0,025	0,25	999,75	2,5	9 997,50
0,03	0,3	999,7	3,0	9997,0
0,05	0,5	999,5	5,0	9995,0
0,1	1,0	999,0	10,0	9990,0
0,15	1,5	998,5	15,0	9985,0
0,2	2,0	998,0	20,0	9980,0
0,25	2,5	997,5	25,0	9975,0
0,3	3,0	997,0	30,0	9970,0
0,4	4,0	996,0	40,0	9960,0
0,45	4,5	995,5	45,0	9955,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
0,8	8,0	992,0	80,0	9920,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0
2,5	25,0	975,0	250,0	9750,0

Примечание: * растворение средства «ВЕЛТОГРАН» при комнатной температуре (20 ± 2 °C) для 2,5 % раствора составляет 9–10 мин. При повышении температуры воды до 30 °C и 40 °C растворимость средства происходит быстрее в 3 и 4 раза и составляет 3 мин и 2,5 мин соответственно.



ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), включая ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкую мебель; поверхности аппаратов, приборов, белья, посуды, предметов ухода за больными, медицинских отходов (в т. ч. изделий медицинского назначения однократного применения, ватные тампоны, перевязочный материал и пр.), санитарно-технического оборудования, резиновых коврик, уборочного материала, проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения.

Режимы дезинфекции объектов при различных инфекционных заболеваниях указаны в табл. 2–11.

Поверхности в помещениях (жесткую мебель, пол, стены, оборудование и т. п.) протирают ветошью, смоченной раствором средства при норме расхода 100 мл/м² поверхности.

Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или чистят щеткой, или ершом при таких же нормах расхода.

Мягкие поверхности, включая мягкую мебель, ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани протирают щеткой, смоченной в растворе средства, норма расхода 150 мл/м² поверхности.

Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии людей.

Обработку объектов способом орошения проводят с помощью специального технического оборудования. Норма расхода средства при орошении составляет 150 мл/м² (распылитель типа «Квазар», гидропульт, автомакс) на одну обработку. После обработки способом орошения помещение проветривают.

Режимы *аэрозольной дезинфекции* представлены в Разделе 4 настоящей Инструкции по применению.





ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

3.2. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. После окончания дезинфекционной выдержки их тщательно промывают водой в течение 3 мин.

3.3. Белье (уборочный материал) погружают в растворы средства из расчета 4 л на 1 кг (при туберкулезе и сибирской язве – 5 л на 1 кг) сухого белья. После окончания дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.4. Посуду столовую (освобождают от остатков пищи) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки посуду прополаскивают проточной водой в течение 3 мин.

3.5. Аптечную и лабораторную посуду (пробирки, пипетки, предметные стекла, резиновые изделия) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают проточной водой в течение 3 мин.

3.6. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в емкость с рабочим раствором средства «ВЕЛТОГРАН», которую на время экспозиции закрывают крышкой, препятствуя всплытию игрушек. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 3 мин.

3.7. Дезинфекцию обуви проводят по режимам отраженным в табл. 14.

3.8. Медицинские отходы, относящиеся к классу Б в соответствии с классификацией по СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», собирают в отдельные емкости (контейнеры) и обрабатывают способом погружения в 1,0 % раствор средства «ВЕЛТОГРАН», обеззараживают в течение





ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

60 мин с последующей утилизацией. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания по режимам, представленным в табл. 4.

3.9. Выделения больного (кроме мочи) и биологические жидкости (слюна, мокрота, кровь, плазма и пр.) остатки пищи засыпают гранулами средства «ВЕЛТОГРАН», после выпитывания жидкости, их собирают в отдельную емкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил противозидемической безопасности (перчатки, фартук); поверхность, на которой находились выделения, протирают раствором средства, в соответствии с табл. 3–4. Собранные в отдельной емкости или одноразовом пакете гранулы через 60 мин утилизируют. Емкость следует продезинфицировать. Для обеззараживания остатков пищи в инфекционных отделениях стационаров раствором средства «ВЕЛТОГРАН» применяют режим в зависимости от вида инфекции.

3.10. Мочу больного, фекалии, промывные воды обеззараживают смешиванием в отдельной ёмкости с 1,5 % рабочим раствором средства, в соотношении 1:1 или засыпают средством «ВЕЛТОГРАН», из расчета 15,0 г гранул на 1 л выделений в соответствии с табл. 3, затем сливают в канализацию. Емкость дезинфицируют.

3.11. Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях.

Изделия медицинского назначения полностью погружают в раствор средства, разъемные изделия погружают в разобранном виде. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью электроотсоса или шприца. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения





ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Емкости с изделиями должны быть закрыты крышками.

После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 3 мин проточной водой, каждый раз пропуская воду через каналы изделия. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 мин).

3.12. Дезинфекцию изделий медицинского назначения при различных инфекциях проводят по режимам, указанным в табл. 2–10.

Режимы *дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой* изделий медицинского назначения представлены в Разделе 5 настоящей Инструкции по применению.

3.13. Для дезинфекции растворы средства «ВЕЛТОГРАН» могут использоваться *многократно* до изменения их внешнего вида раствора (помутнение, изменение цвета, появление хлопьев и т. д.), но не более 14 суток.

3.14. Оттиски, зубопротезные заготовки дезинфицируют путем их погружения в рабочий раствор средства (табл. 13.) По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 30 сек. с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе. Средство можно использовать многократно в течение 14 суток. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора (образование хлопьев, изменение цвета, помутнение и т. д.) его следует заменить.





ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.15. Отсасывающие системы стоматологические (слюноотсосы) дезинфицируют, применяя один из рабочих растворов средства (табл. 13). Рабочий раствор, объемом 1 л пропускают через отсасывающую систему установки в течение 2 мин, затем оставляют в ней для обеззараживания (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1–2 раза в день, в т. ч. по окончании рабочей смены.

3.16. Дезинфекцию кузевов для недоношенных детей проводят в соответствии с «Методическими указаниями по дезинфекции кузевов для недоношенных детей» приложение № 7 к Приказу МЗ СССР № 440 от 20.04.83 г. Обработку кузевов осуществляют методом протирания в соответствии с режимом, указанным в табл. 3. Норма расхода средства на обработку кузева составляет 100 мл/м² поверхности. После обработки закрывают крышу камеры на время экспозиции. После экспозиции открывают камеру, и все внутренние поверхности трижды протирают стерильной ветошью, обильно смоченной в воде, а затем вытирают насухо. Включают бактерицидную лампу и облучают камеру в течение 30 мин. Закрывают крышу камеры, включают аппарат и выдерживают в течение 1 часа.

3.17. Для борьбы с плесневыми грибами объекты сначала тщательно очищают с помощью щетки раствором средства, затем обрабатывают раствором средства. Режимы дезинфекции различных объектов представлены в табл. 12.

3.18. Обработку объектов санитарного транспорта, осуществляют методом протирания ветошью, смоченной средством из расчета 100 мл/м² или путем орошения из расчета 150 мл/м² до полного смачивания поверхностей. Обработку проводить в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции санитарного транспорта при различных температурных ус-





ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

ловиях» № 835-70 от 06.01.70 г. по режимам, представленным для обеззараживания поверхностей в табл. 4.

3.19. Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводится только при выключенных системах под руководством инженера по вентиляции. Дезинфекции подвергают воздухозаборные и воздухораспределительные компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха (решетки, диффузоры, сопла, насадки, сетки, фильтры и т. д.). Перед дезинфекцией проводят очистку этих компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Проведение профилактической дезинфекции вентиляционных систем и кондиционеров проводится в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», «Методических рекомендациях по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха», утв. ФГУ ЦГСЭН г. Москвы, 2004 г.

В соответствии с нормативными документами СП 3.5.1378-03 площадь обрабатываемой поверхности воздухопроводов систем вентиляции рассчитывается путем умножения длины окружности короба (периметра) на его высоту и зависит от протяженности обрабатываемого воздухопровода. Дезинфекция элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в т. ч. обеззараживания воздухопроводов, осуществляется методом протирания, орошения раствором средства при экспозиции 60 мин в режиме эффективном в отношении возбудителей бактериальных инфекций (табл. 2). Данный режим обеспечивает дезинфекцию в отношении возбудителей легионеллез (см. табл. 11).

Средство «ВЕЛТОГРАН» биоразлагаемое, рабочие растворы средства в режимах применения не оставляют осадка на обрабатываемых поверхностях. В соответствии с норма-



ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

тивными документами для дезинфекции поверхностей воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха методом орошения норма расхода растворов средства составляет 100 мл/м². Средство «ВЕЛТОГРАН» в виде водных растворов обладает моющими свойствами позволяющими сочетать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией.

Включение систем вентиляции и кондиционирования воздуха после очистки и дезинфекции осуществляет специалист, ответственный за их эксплуатацию.

3.20. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских учреждениях предварительно отодвигают от стен мебель; поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т. д.), поверхности приборов, жесткую мебель обрабатывают растворами «ВЕЛТОГРАН» способом протирания и орошения (кроме детских учреждений). Дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 15. Мягкая мебель, ковровые и прочие напольные покрытия обрабатываются в соответствии с режимом, указанным в табл. 2.

Уборка после дезинфекции не требуется, т. к. средство обладает моющим действием.

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОГРАН» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии, в т. ч. внутрибольничных инфекциях

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания (мин)	Способ обеззараживания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование	0,025	120	Протирание или орошение
	0,05	60	
	0,15	30	
	0,25	15	

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
Поверхности мягкие, в т. ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	0,1	60	Протирание щеткой
Поверхности на объектах транспорта	0,025 0,05 0,15 0,25	120 60 30 15	Протирание или орошение
Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)	0,05 0,1	60 30	Погружение Протирание
Белье, не загрязненное выделениями	0,05	30	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,05 0,1 0,25*	120 60 30	Замачивание
Посуда без остатков пищи	0,025 0,05	30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи	0,05 0,1	60 30	Погружение
Предметы для мытья посуды	0,05 0,1	60 30	Погружение
Посуда лабораторная и аптечная	0,05 0,1	60 30	Погружение
Игрушки (из пластмассы, резины, металла)	0,1	60	Погружение
Санитарно-техническое оборудование	0,1	60	Протирание
	0,25	30	
	0,1	90	Орошение
	0,25	60	
Изделия медицинского назначения	0,1	60	Погружение
Уборочный материал	0,05 0,1	120 60	Погружение
Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,05 0,1	60 30	Протирание или орошение

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
Фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,05 0,1	60 30	Погружение

Примечание: * эффективная концентрация средства при загрязнении фекалиями.

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОГРАН» при инфекциях вирусной этиологии

Объекты обеззараживания		Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания (мин)	Способ обеззараживания
1		2	3	4
Изделия медицинского назначения	из металлов, пластмасс, стекла	0,2	60	Погружение
	из резин	0,25	60	
	стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся и отсасывающие системы	0,2 0,25	60 30	
	стоматологические материалы, в т. ч. оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы	0,2 0,25	60 30	
	жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним	0,2 0,25	60 30	
	Поверхности в помещениях, предметы обстановки, приборы, оборудование	0,2	60	
Кувезы		0,25	60	Протирание

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Продолжение табл. 3

1		2	3	4
Транспортные средства		0,25	60	Протирание Орошение
Предметы ухода за больными	из металлов, пластмасс, стекла	0,2	60	Погружение или протирание
	из резин	0,25	60	
Белье, не загрязненное выделениями		0,2	60	Замачивание
Санитарно-техническое оборудование		0,25	60	Протирание или орошение
		0,2	30	Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин
Медицинские отходы перед утилизацией*		0,25	60	Погружение в избыток раствора
Резиновые коврики		0,25	60	Погружение, протирание
Уборочный материал		0,25	60	Погружение
Выделения, биологические жидкости (слюна, мокрота, кровь, плазма и пр.)		1,5	60	Засыпать избытком средства до полного впитывания

Примечание: * режим применяется, в т. ч. для обеззараживания медицинских отходов при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и грибковой этиологии.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами
средства «ВЕЛТОГРАН» при туберкулезе

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), %	Время обеззара- живания, мин	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование, транспортные средства	0,5 0,75	60 30	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т. ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	1,0	60	Протирание щеткой
Объекты санитарного транспорта	0,5 0,75	60 30	Протирание или орошение
Посуда без остатков пищи	0,5 0,75	60 30	Погружение
Посуда с остатками пищи	0,75 1,0	60 30	Погружение
Посуда лабораторная, аптечная	0,75 1,0	60 30	Погружение
Белье, не загрязненное выделениями	0,75 1,0	60 30	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	1,0	60	Замачивание
Предметы ухода за больными	0,75	60	Погружение или протирание
Игрушки	0,5 0,75	60 30	Погружение или протирание
Санитарно-техническое оборудование	0,75 1,0	60 30	Протирание Орошение

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Продолжение табл. 4

1	2	3	4
Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в т. ч. хирургические и стоматологические инструменты), эндоскопы и инструменты к ним	0,75 1,5	60 15	Погружение
Медицинские отходы	1,0	60	Погружение
Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов	0,75 1,0	60 30	Протирание или орошение
Уборочный материал, инвентарь, предметы для мытья посуды	0,75 1,0	60 30	Погружение
Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха;	0,75 1,0	60 30	Протирание или орошение
фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,75 1,0	60 30	Погружение

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Таблица 5

**Режим дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОГРАН»
при кандидозах и дерматофитиях**

Объекты обеззараживания	Концентра- ция рабоче- го раствора (по препара- ту), %	Время обеззараживания, мин		Способ обеззара- живания
		канди- дозы	дермато- фитии	
1	2	3	4	5
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование, транспортные средства	0,2 0,25	60 45	60 45	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т. ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	0,75	–	60	Протирание щеткой
Посуда без остатков пищи	0,2 0,25	30 15	–	Погружение
Посуда с остатками пищи	0,25	60	–	Погружение
Посуда лабораторная, аптечная	0,25	60	60	Погружение
Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами, игрушки	0,2 0,25	60 45	60 45	Погружение или протирание
Белье не загрязненное	0,2 0,25	45 30	60 45	Замачивание
Белье загрязненное	0,25	60	60	Замачивание

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Продолжение табл. 5

1	2	3	4	5
Санитарно-техническое оборудование	0,25 0,75	60 –	90 15	Протирание орошение
Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в т. ч. хирургические и стоматологические инструменты), эндоскопы и инструменты к ним	0,25	60	60	Погружение
Медицинские отходы	0,25	60	60	Погружение
Уборочный материал, инвентарь, предметы для мытья посуды	0,25 0,75	60 15	60 15	Погружение
Резиновые коврики	0,25	90	90	Погружение или протирание

Таблица 6

**Режимы дезинфекции объектов растворами
средства «ВЕЛТОГРАН» при холере**

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, (по препарату) %	Время обеззара- живания	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте	0,02 0,03	30 15	Протирание или орошение
Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева	0,03 0,05	30 15	Протирание или орошение

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Продолжение табл. 6

1	2	3	4
Санитарно-техническое оборудование	0,03	15	Протирание или орошение
Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т. ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним)	0,05 0,1	30 15	Погружение
Посуда без остатков пищи	0,02	60	Погружение
Посуда с остатками пищи	0,03 0,05	60 15	Погружение
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами	0,02 0,03	60 15	Погружение
Белье незагрязненное	0,02 0,03 0,05	60 30 15	Погружение
Белье, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами	0,03 0,05 0,1	60 30 15	Погружение
Уборочный материал	0,03 0,05	60 30	Погружение
Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами	0,025 0,05 0,1	60 30 15	Погружение или протирание

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Таблица 7

**Режимы дезинфекции объектов растворами
средства «ВЕЛТОГРАН» при чуме**

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, (по препарату) %	Время обеззара- живания	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте	0,05 0,1	30 15	Протирание или орошение
Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева	0,05 0,1	60 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,02 0,025 0,05	60 30 15	Протирание или орошение
Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т. ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним)	0,05 0,1	30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи	0,025 0,05	60 15	Погружение
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами	0,025 0,05	60 15	Погружение
Белье незагрязненное	0,025 0,05	60 15	Замачива- ние
Белье, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами	0,05 0,1	60 15	Замачива- ние
Уборочный материал	0,05 0,1	60 15	Погружение
Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами	0,025 0,05 0,1	60 30 15	Погружение или протирание

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Таблица 8

**Режимы дезинфекции объектов средством «ВЕЛТОГРАН»
при туляремии**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара- живания (мин)	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте	0,05 0,1	30 15	Протирание или орошение
Резиновые коврики, поверхности из не окрашенного дерева	0,05 0,1	60 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,025 0,05	60 15	Протирание или орошение
Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т. ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним)	0,05 0,1	30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи	0,025 0,05	60 15	Погружение
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами	0,025 0,05	60 15	Погружение
Белье незагрязненное	0,025 0,05 0,1	60 30 15	Замачива- ние
Белье, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами	0,05 0,1	60 15	Замачива- ние
Уборочный материал	0,05 0,1	60 15	Погружение
Предметы ухода за больны- ми, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами	0,025 0,05 0,1	60 30 15	Погружение или протирание

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Таблица 9

**Режимы дезинфекции объектов средством «ВЕЛТОГРАН»^{*}
при анаэробных инфекциях**

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, (по препарату) %	Время обеззара- живания	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте	1,0 2,0	120 60	Протирание или орошение
Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева	2,0	120	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	2,0	120	Протирание или орошение
Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т. ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним)	2,0	120	Погружение
Посуда с остатками пищи	2,0	120	Погружение
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами	2,0	120	Погружение
Белье незагрязненное	1,0 2,0	120 60	Замачива- ние
Белье, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами	2,0	120	Замачива- ние
Уборочный материал	2,0	120	Погружение
Предметы ухода за больны- ми, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами	2,0	120	Погружение или протирание

Примечание: * температура раствора в начале обработки 50–55 °С; в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Таблица 10

**Режимы дезинфекции объектов растворами
средства «ВЕЛТОГРАН» при сибирской язве**

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара- живания, мин	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте	0,5 1,0	60 30	Протирание или орошение
Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева	2,0 2,5	60 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание или орошение
Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т. ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним)	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи	1,0 2,0	30 15	Погружение
Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами	1,0 2,0	30 15	Погружение
Белье незагрязненное	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Замачива- ние
Белье, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами	1,0 2,0 2,5	60 30 15	Замачива- ние
Уборочный материал	1,0 2,0 2,5	60 30 15	Погружение

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Продолжение табл. 10

1	2	3	4
Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Погружение или протирание

Примечание: * температура раствора в начале обработки 50–55 °С; в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

Таблица 11

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«ВЕЛТОГРАН» при легионеллезе**

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, (по препарату) %	Время обеззара- живания	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте	0,025 0,05	30 15	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,025 0,05	30 15	Протирание или орошение
Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,025 0,05	30 15	Протирание или орошение
Фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,025 0,05	30 15	Погружение

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Таблица 1.2

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОГРАН»
в отношении плесневых грибов**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обезза- ражива- ния, мин	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,25	90	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т. ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель	0,75	60	Протирание щеткой
Белье	0,25	90	Замачива- ние
Посуда аптечная и лабораторная	0,25	90	Погружение
Уборочный материал	0,25	90	Погружение
Резиновые коврики	0,25	90	Погружение или протирание

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Таблица 13

**Режимы дезинфекции стоматологических изделий ряда
наименований**

Вид обрабатываемых изделий	Вид обработки и показания к применению	Режимы обработки	
		Концентрация раствора средства (по препарату), %	Время дезинфекции, мин
1	2	3	4
Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы; слюноотсосы	Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях	0,2	60
		0,25	30
Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы; слюноотсосы	Дезинфекция при туберкулезной инфекции	0,75	60

Таблица 14

Режимы дезинфекции обуви растворами средства «ВЕЛТОГРАН»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания (мин) в отношении			Способ обеззараживания
		Возбудителей		плесневых грибов	
		кандидоза	дерматофитий		
1	2	3	4	5	6
Обувь из кожи, ткани, дерматина	0, 25	30	60	90	Двукратное протирание внутренних поверхностей
Обувь из пластика и резины	0,25	30	60	90	Погружение

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Таблица 15

**Режимы дезинфекции объектов средством «ВЕЛТОГРАН»
при проведении генеральных уборок**

Профиль учреждения	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара- живания, мин	Способ обеззара- живания
1	2	3	4
Соматические отделения ЛПУ (кроме процедурного кабинета)	0,05 0,1	120 60	Протирание или ороше- ние
Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории в ЛПУ	0,25	60	Протирание или ороше- ние
Туберкулезные лечебно- профилактические учреждения	0,75	60	Протирание или ороше- ние
Инфекционные лечебно- профилактические учреждения*	–	–	Протирание или ороше- ние
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	0,25	60	Протирание или ороше- ние
Детские учреждения	0,05	60	Протирание

Примечание: * по режиму соответствующей инфекции.

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

4.1. Аэрозольная дезинфекция проводится с помощью соответствующих технических средств генераторов аэрозолей (размер аэрозольных частиц не менее 20 мкм).

4.2. Помещения предварительно герметизируют: уплотняют окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. Аэрозольную дезинфекцию рекомендуется проводить после предварительной влажной уборки помещения и оборудования.

4.3. Аэрозольную дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 16.

Таблица 16

Режимы аэрозольной дезинфекции воздуха
и поверхностей в помещениях

Объект дезинфекции	Концентрация рабочего раствора, %	Расход рабочего раствора мл/м ³	Экспозиция (мин)
1	2	3	4
Воздух, поверхности в помещениях*	0,5	50	60
Воздух**	0,25	12	30

Примечание: * дезинфекции подвергаются все поверхности помещения (стены, потолок, пол, наружные поверхности оборудования и аппаратуры, изготовленные из различных материалов;

** при необходимости дезинфекции только воздушной среды помещения, предварительно проводят дезинфекцию поверхностей методом протирания или орошения.



ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН»
ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

5.1. Растворы средства «ВЕЛТОГРАН» применяют для:

- предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, ручным и механизированным способами (с использованием ультразвука);
- предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным способами.

5.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, совмещенную с предстерилизационной очисткой проводят ручным способом в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях; механизированным способом – в ультразвуковых мойках (типа УЗО-«МЕДЭЛ», УВ-1 «Ультразв» и пр.) в соответствии с руководством по эксплуатации аппаратов (табл. 18, 20).

Изделия погружают в рабочий раствор сразу же после их применения. Разъемные изделия погружают в емкости для дезинфекции в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Емкости с изделиями могут быть закрыты крышками.

После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков





ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

средства проточной питьевой водой в течение 3 мин. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 мин).

5.3. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения ручным и механизированным способами, не совмещенную с дезинфекцией осуществляют в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 19, 20, после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкциями (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

5.4. Очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят в соответствие с МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним осуществляют в соответствии с режимами, представленными в табл. 21.

5.5. Предстерилизационную очистку эндоскопов, используемых при стерильных эндоскопических манипуляциях, окончательную очистку (перед ДВУ) эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, а также предстерилизационную очистку инструментов к эндоскопам, проводят после их предварительной очистки, ручным или механизированным способами в соответствии с режимами, представленными в табл. 20, 22, 23.





ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.6. Окончательную очистку эндоскопов перед ДВУ, а также предстерилизационную очистку изделий растворами средства «ВЕЛТОГРАН» ручным способом проводят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях; механизированным способом – в ультразвуковых ваннах. Изделия полностью погружают в раствор средства, обеспечивая заполнение всех каналов и полостей раствором, избегая образования воздушных пробок. Каналы и полости изделий заполняют раствором средства с помощью электроотсоса или шприца. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

5.7. После окончания дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой раствором средства, отмыв инструментов проводят под проточной питьевой водой в течение 3 мин.

5.8. Отмыв изделий медицинского назначения после предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводят под проточной питьевой водой в течение 1,5 мин.

5.9. Растворы средства для проведения предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной и не совмещенной



ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

с дезинфекцией, как ручным, так и механизированным способами можно применять многократно, но не более 14 суток до момента изменения внешнего вида средства (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка, появление хлопьев и пр.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор средства необходимо заменить.

5.10. Качество предстерилизационной очистки контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в Методических указаниях «Конт-роль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, из которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 17

Режим дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с предстерилизационной очисткой, (кроме эндоскопов и инструментов к ним) ручным способом

Этапы обработки	Режимы обработки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки, мин
1	2	3	4
Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнения им полостей и каналов: • из металлов, пластмасс, стекла, резин	0,25* 0,75**	Не менее 18	60 60
	1,0*** 2,0****	50-55	30 120

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 17

1	2	3	4
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – при помощи шприца: • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости	То же	То же	0,5 1,0
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		3,0
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		0,5

Примечание: * режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН, при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей туберкулеза;

*** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей сибирской язвы; температура раствора в начале обработки 50–55 °С, в дальнейшем указанная температура не поддерживается;

**** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей анаэробных инфекций, температура раствора в начале обработки 50–55 °С, в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Таблица 18

**Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения,
совмещенной с предстерилизационной очисткой,
механизированным способом***

Объект обработки	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара- живания, мин	Способ обеззараживания
1	2	3	4
Изделия медицинско- го назначения из раз- личных материалов: • не имеющие замко- вых частей, каналов или полостей; • имеющие замковые части, каналы или по- лости; • стоматологические изделия	0,75	15	Погружение в рабочий раствор средства с поледующей ультразвуковой обработкой

Примечание: * обеспечивается дезинфекция в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 19

**Режимы предстерилизационной очистки изделий
медицинского назначения, не совмещенной с дезинфекцией,
(кроме эндоскопов и инструментов к ним) ручным способом**

Этапы при проведении очистки	Режимы очистки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Температу- ра рабо- чего раствора, °C	Время вы- держки / обработ- ки, мин
1	2	3	4
Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме стоматологических изделий, имеющих алмазную рабочую часть);	0,25	Не менее 18	15
• изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, включая стоматологические изделия с алмазной рабочей частью и стоматологические щипцы	0,4		15
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – при помощи шприца: • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости	В соот- ветствии с концентраци- ей раствора, использован- ного на этапе замачивания	То же	0,5 1,0

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Продолжение табл. 19

1	2	3	4
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,5
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		0,5

Таблица 20

Режимы предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки изделий медицинского назначения (включая эндоскопы и инструменты к ним), не совмещенной с дезинфекцией механизированным способом

Этапы очистки	Режимы очистки		
	Концентрация раствора (по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки, мин
1	2	3	4
Предварительная очистка*	0,25	Не менее 18	Не нормируется
Ультразвуковая обработка при полном погружении в средство:	0,25	Не менее 18	3
• инструментов, не имеющих замковых частей;			
• медицинских изделий из пластика и стекла;			3
• медицинских изделий из резины;			5
• инструментов, имеющих замковые части;			10
• жестких и гибких эндоскопов;			10
• медицинских инструментов к эндоскопам			5

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 20

1	2	3	4
Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки	Не нормируется		1,5
Ополаскивание дистиллированной водой вне установки	Не нормируется		0,5

Примечание: * для жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Таблица 21

Режим предварительной очистки эндоскопов и инструментов
к ним ручным способом

Этапы очистки	Концентрация растворов (по препарату), %	Температура рабочего раствора, °C	Время выдержки обработки на этапе, мин
1	2	3	4
Жесткие и гибкие эндоскопы: - удаление видимых загрязнений с наружной поверхности эндоскопа, в т. ч. с объектива, тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу; - снятие заглушек и клапанов и погружение их в рабочий раствор средства с обеспечением контакта всех поверхностей с раствором; - промывание каналов эндоскопа водой согласно инструкции производителя эндоскопа	0,25	Не менее 18	Не нормируется

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Продолжение табл. 21

1	2	3	4
Инструменты к гибким эндоскопам: - погружение в рабочий раствор средства с обеспечением полного контакта раствора с ними; - очищение их под поверхностью раствора при помощи тканевой (марлевой) салфетки, не допуская его разбрызгивания; - промывание водой	0,25	Не менее 18	Не нормируется

Таблица 22

**Режим предстерилизационной или окончательной очистки
ручным способом гибких и жестких эндоскопов,
не совмещенной с их дезинфекцией**

Этапы при проведении очистки	Режимы очистки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки, мин
1	2	3	4
Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов	0,5	Не менее 18	15

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 22

1	2	3	4
Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: • Гибкие эндоскопы: – инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; – внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; – наружную поверхность моют при помощи марлевой (тканевой) салфетки • Жесткие эндоскопы: – каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; – каналы промывают при помощи шприца	То же	То же	2,0 3,0 1,0 2,0 2,0
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,5
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,0

ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

Таблица 23

**Режим предстерилизационной или окончательной очистки
ручным способом, не совмещенной с дезинфекцией,
медицинских инструментов к гибким и жестким эндоскопам**

Этапы при проведении очистки	Режим очистки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Температу- ра рабоче- го раство- ра, °С	Время выдержки/ обработки, мин
1	2	3	4
Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца	0,5	Не менее 18	15
Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: • наружной (внешней) поверхности – при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов – при помощи шприца	То же	То же	2,0 1,5
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,5
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		1,0



ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН»
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭНДОСКОПОВ

**6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН»
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭНДОСКОПОВ**

6.1. Растворы средства «ВЕЛТОГРАН» применяют для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов.

6.2. Эндоскопы, предназначенные для *нестерильных эндоскопических манипуляций* подлежат дезинфекции *высокого уровня* (ДВУ). Предварительную и предстерилизационную очистку эндоскопов проводят раствором средства «ВЕЛТОГРАН» (табл. 20–22) или одного из средств, разрешенных в установленном порядке в России для цели предварительной и предстерилизационной очистки в соответствии с Инструкцией по применению.

6.3. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

6.4. Дезинфекцию высокого уровня растворами средства проводят в стерильных эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. Изделия медицинского назначения полностью погружают в раствор, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Емкости для проведения дезинфекции высокого уровня предварительно стерилизуют паровым методом.





ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

При проведении ДВУ все манипуляции проводят в асептических условиях.

6.5. Режимы ДВУ эндоскопов приведены в табл. 24.

6.6. По окончании дезинфекционной выдержки изделия из дезинфицирующего раствора извлекают, удаляя с помощью стерильного шприца или специального устройства остатки раствора из полостей и каналов эндоскопа путем прокачивания воздуха. Продезинфицированный эндоскоп переносят в емкость со *стерильной питьевой* или *дистиллированной водой* для отмыва от остатков средства. Отмыв осуществляют путем *двукратного* (по 5 мин каждое) погружения изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1, либо путем промывания под стерильной проточной водой в течение 5 мин. Каналы эндоскопов промывают струей воды с помощью шлангов для промывания каналов и специального устройства (инжектора) или с помощью шприца (не менее 20 мл).

Полости и каналы эндоскопа по завершении промывания просушивают посредством продувки воздухом. Продезинфицированные и промытые эндоскопы хранят, соблюдая правила асептики, исключая вторичную контаминацию микроорганизмами.

6.7. Для ДВУ эндоскопов растворы средства можно использовать *многократно* (в течение 14 суток), если их внешний вид не изменился.

При первых признаках изменения внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение и т. п.) его необходимо заменить до истечения указанного срока.

Во избежание разбавления растворов средства при использовании в них следует погружать только изделия, на поверхности и в каналах которых отсутствуют остатки влаги.





**ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН»
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

6.8. Эндоскопы и инструменты к ним, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях подлежат стерилизации.

Таблица 24

**Режим дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов
растворами средства «ВЕЛТОГРАН»**

Вид обрабатываемых изделий	Режим дезинфекции высокого уровня		
	Температура рабочего раствора, °С	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время выдержки, мин
1	2	3	4
Жесткие и гибкие эндоскопы	При начальной температуре раствора не менее 18	2,5	15

**7. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН»
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

7.1. Для стерилизации изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины, стекло, пластмассы) применяют 0,5 %, 1,0 % и 2,0 % (по препарату) растворы средства при температуре раствора в начале обработки 50–55 °С; в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

7.2. Перед стерилизацией изделий средством «ВЕЛТОГРАН» проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями (Инструкцией) по применению конкретного средства.



ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

7.3. Стерилизацию изделий медицинского назначения средством «ВЕЛТОГРАН» проводят в стерильных пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая тщательное заполнение им всех каналов и полостей изделий. Для лучшего заполнения каналов средством и более полного удаления из них пузырьков воздуха используют шприцы, пипетки или другие вспомогательные средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Стерилизуемые изделия должны быть свободно размещены в емкости с раствором; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Стерилизацию проводят при температуре воздуха в помещении не ниже 20 °С, используя емкости, содержащие не менее 2 л раствора средства.

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения приведены в табл. 25.

Таблица 25

**Режимы стерилизации изделий медицинского назначения
рабочими растворами средства «ВЕЛТОГРАН»**

Стерилизуемые изделия	Начальная температура рабочего раствора, °С	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время стерилизационной выдержки, мин
1	2	3	4
Изделия из металлов, резина на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним)	50–55	0,5	60
	50–55	1,0	30
	50–55	2,0	15



ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОГРАН» ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

7.4. При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая асептические условия, используя стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.

7.5. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства, удаляя его из каналов, и переносят в стерильную емкость со стерильной водой для отмыва от остатков средства.

Отмыв осуществляют путем двукратного (по 5 мин каждое) погружения изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают стерильную воду в течение 3–5 мин (не менее 20 см³), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132 °С в течение 20 мин.

7.6. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток.

7.7. Рабочие растворы средства для стерилизации используют *однократно*.





ИНСТРУКЦИЯ № 005-10/07-И

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

8.2. При обработке поверхностей в помещениях способом протирания не требуются средства защиты органов дыхания. Работы можно проводить в присутствии пациентов.

8.3. При обработке способом орошения персонал должен использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В; глаз – герметичными очками. Обработку проводить в отсутствие пациентов, после окончания дезинфекции помещение проветривают.

8.4. При обработке способом распыления:

8.4.1. с управлением технического средства (установки) вне обрабатываемого помещения, средства индивидуальной защиты включают: специальную одежду (халат, головной убор), индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, глаз – герметичными очками, рук – резиновыми перчатками;

8.4.2. с нахождением технического средства (установки) в обрабатываемом помещении, средства индивидуальной защиты включают: защитный комбинезон; панорамная маска ППМ-88, противогаз с комбинированными защитными фильтрами (газовый фильтр типа А), перчатки.

8.5. Во время работы аэрозольного генератора можно находиться в помещении в средствах индивидуальной защиты не более 20 мин.





ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

8.6. После дезинфекции способом распыления помещение проветривают в течение 30 мин.

8.7. При проведении любых работ следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

8.8. При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой.

8.9. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям.

8.10. Меры защиты окружающей среды: можно сливать в канализацию в разбавленном виде.

9. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

9.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

9.2. При попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 10–15 мин, при раздражении закапать 30 % раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

9.3. При попадании средства или его растворов в желудок выпить несколько стаканов воды с 15–20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать. При необходимости обратиться к врачу.





