

Режимы применения средства Велталь-орто				
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ	% по средству	% по ДВ в рабочих растворах		
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	-			
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-			
Протирание поверхностей (туберкулез)	-			
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-			
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-			
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-			
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	0,5%-15мин	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ		
		15	0,025%	0,035% 0,06%
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-			
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	5%-15мин	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ		
		15	0,25%	0,35% 0,6%
ПСО	-			
Стерилизация	5%-90мин;	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ		
	5%-60мин(t=50C)	90	0,25%	0,35% 0,6%
		60	0,25%	0,35% 0,6%
ДВУ	5%-5мин	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ		
		5	0,25%	0,35% 0,6%
Дезинфекция кожных покровов	-			